

AVENT Osłonki piersi silikonowe rozmiar M 2szt.

Cena: 71,16 pln



Opis słownikowy

Klasyfikacja	Lek
Marka Producent	PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.
Opakowanie	2 szt.
Postać	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Osłony brodawek są zaprojektowane tak, aby pomóc mamom karmić piersią, gdy ma problemy z brodawkami lub gdy dziecko ma kłopot z przyssaniem się. Wyjątkowo cienka osłona brodawki w kształcie motyla umożliwia dziecku kontakt z piersią i nie przeszkadza w nawiązywaniu więzi z dzieckiem podczas karmienia. Kształt zapewniający kontakt ze skórą. Ochrona podrażnionych brodawek. Rozmiar średni (21 mm) 2 szt. **Sposób użycia** Należy wyczyścić osłonki brodawki sutkowej przed każdym użyciem. Zajmuje to mniej niż 10 minut. Umieść osłonki we wrzącej wodzie na pięć minut lub użyj specjalnego etui. Włóż do niego dobrze wypłukane osłonki i wlej 25 ml wody. Następnie umieść etui w kuchence mikrofalowej i włącz moc 750–1000 W na 3 minuty. Odczekaj pięć minut, aż ostygną. Wylej wodę. Osłonki są gotowe do użycia. Z tego wygodnego etui do czyszczenia osłonek warto korzystać w trakcie podróży. Oczywiście służy ono także do ich przechowywania.