

## Test ciążowy VITAM Strumieniowy

Cena: 5,36 pln



### Opis słownikowy

Klasyfikacja	Wyrób medyczny inny
Marka Producent	DIAGNOSIS S.A.
Opakowanie	1 sztuka
Postać	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

Prosty – do samodzielnego wykonania Czuły – wykrywa hCG przy stężeniu 10 mIU/ml Wiarygodny – wiarygodność testu wynosi 98% Dokładny – potrafi wykryć już 2-3 dniową ciążę Szybki – wynik w ciągu 5 minut Komfortowy - nie wymaga zbierania moczu.

**Wskazanie** Wyrób przeznaczony jest do diagnostyki in vitro, wyłącznie do użytku zewnętrznego. Wyrób medyczny do samokontroli. Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. **Sposób użycia** Jedną ręką uchwycić za okrągłą końcówkę obudowy testu. Drugą ręką należy zdjąć zatyczkę końcówki absorbującej tak, aby absorbent nie był niczym zakryty. Skierować część z końcówką absorbującą ku dołowi i umieścić końcówkę absorbującą w strumieniu moczu na ok. 10 sekund tak, aby została dokładnie nasączona. Po wykonaniu testu nałożyć zatyczkę i poczekać na pojawienie się kolorowej linii. Wynik pozytywny pojawi się już po 1 minucie. Nie mniej jednak, aby potwierdzić wynik negatywny należy odczekać 3 minuty. Interpretacja testu WYNIK POZYTYWNY: Jeżeli w strefie kontrolnej (C) oraz w strefie testowej (T) pojawiły się linie oznacza to, że jesteś w ciąży. WYNIK NEGATYWNY: Jeżeli linia pojawiła się tylko w strefie kontrolnej (C) oznacza to, że nie jesteś w ciąży. WYNIK NIEWAŻNY: 1. Pojawia się linia tylko w strefie testowej (T) i nie pojawi się w strefie (C). 2. Nie pojawi się żadna linia w strefie testowej (T) oraz w strefie kontrolnej (C).