

SALVEQUICK Blister Prevention Heels & Toes 10 sztuk

Cena: 33,44 pln



Opis słownikowy

Klasyfikacja	Wyrób medyczny inny
Marka Producent	SORAYA
Opakowanie	10 sztuk
Postać	plastry
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Blister Prevention Heels & Toes to zestaw plastrów na pęcherze na piętach i palcach stóp. Plastry na pęcherze są wykonane ze specjalistycznego materiału hydrokoloidowego, który natychmiast zmniejsza ucisk i tarcie. Ten rodzaj plastra na pęcherze przeznaczony jest do zapobiegania tworzeniu się pęcherzy. Opakowanie zawiera 6 plastrów na pęcherze specjalnie dostosowanych do pięt i 4 plastry do palców u stóp. **Jak stosować?** 1. Przemyj ranę i skórę wokół letnią wodą lub płynem do przemywania ran. 2. Upewnij się, że skóra jest całkowicie sucha, czysta i nietłusta, wolna od emulsji i balsamów. 3. Usuń zadrukowany papier ochronny z plastra. 4. Oderwij połowę folii wzdłuż perforacji. 5. Usuń plaster z folii i przyłóż go po środku pęcherza. Pozostaw plaster do czasu, aż sam się odklei. Aby łatwo usunąć plaster pociągnij go z jednej strony i rozciągnij ostrożnie równoległe do skóry. **Kiedy stosować?** Ten plaster na pęcherze przeznaczony jest do zapobiegania tworzeniu się pęcherza – do stosowania zanim pojawi się pęcherz lub gdy pojawiło się zaczerwienienie na skórze. Uwaga: osoby z zaburzeniami procesu gojenia się ran, np. chorzy na cukrzycę, osoby starsze, powinny regularnie sprawdzać miejsce pęcherza. Nie stosować na krwiste lub głębokie, mocno krwawiące lub zainfekowane pęcherze. **Zawartość opakowania** 6 x 40mm x 61mm 4 x 21mm x 64mm