

SALVEQUICK Transparent Plastry 20 sztuk



Cena: 13,26 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja	Wyrób medyczny inny
Marka Producent	CEDERROTH POLSKA S.A.
Opakowanie	20 sztuk
Postać	plastry
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Transparent to przezroczysty, dyskretny plaster, który doskonale nadaje się do opatrywania mniejszych ran na co dzień. Ten oddychający plaster jest odporny na wodę i brud. Dobrze przylega do skóry, jest elastyczny i rozciągliwy. Opakowanie zawiera 20 plastrów w trzech rozmiarach. **Jak stosować?** 1. Oczyszczyć ranę oraz skórę wokół i upewnić się, że jest sucha. 2. Upewnić się, czy nie jest zainfekowana. Przyklej plaster. 3. Codziennie zmieniaj plaster na nowy i przemywaj ranę, aby mieć pewność, że rana goi się prawidłowo i nie rozwija się zakażenie. Ponadto zmieniaj plaster, jeśli się zabrudzi lub przemoczy. **Kiedy stosować?** Plaster Transparent przeznaczony jest do stosowania na niewielkie rany, np. na małe i powierzchniowe skaleczenia. **Zawartość opakowania** 6 x 16mm x 56mm 8 x 19mm x 72mm 6 x 25mm x 72mm