

Corega Power Max Mocowanie + Komfort 40g

Cena: 26,20 pln



Opis słownikowy

Klasyfikacja	Wyrób medyczny inny
Marka Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Opakowanie	40 g
Postać	krem
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Krem COREGA MAX MOCOWANIE + KOMFORT poprawia komfort codziennego użytkowania protez częściowych lub całkowitych, dzięki mocnej jej stabilizacji w jamie ustnej. Ponadto, zabezpiecza przed przedostawaniem się drobinek jedzenia pod płytę protezy. - Krem mocuje protezę nawet na 12 godzin - Precyzyjny aplikator umożliwi naniesienie odpowiedniej ilości produktu. - Chroni dziąsła przed naciskiem. **Stosowanie** Oczyszczyć i osuszyć protezę i wypłucz usta. Następnie postępuj zgodnie z ilustracjami na opakowaniu, by w odpowiedni sposób nanieść produkt na protezę częściową lub całkowitą. Włóż protezę i mocno ją dociśnij. Przygryź ją na kilka sekund i gotowe! Przed wyjęciem protezy zębowej przepłucz usta wodą, a następnie poruszaj protezę. **Skład** Guma celulozowa, wazelina, parafina płynna, Kopolimer wapniowo-sodowy PVM/MA, karbomer.